

Labor - Lanzetten



Sicherheitslanzetten Ultrasafe 17 G, 1,40 mm x 2,0 mm, grün (100 Stück)

ArtNr:	19170013
PZN:	19264782
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

Anwendung:

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen