

Labor - Lanzetten

Sicherheitslanzetten Ultrasafe 26 G, 0,45 mm x 1,8 mm, gelb (100 Stück)



ArtNr:	19170017
PZN:	19264842
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

Anwendung:

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen