

Labor - Lanzetten



Sicherheitslanzetten Ultrasafe 21 G, 0,80 mm x 2,2 mm, orange (100 Stück)

ArtNr:	19170015
PZN:	19264807
Umkarton:	10 Packungen

Beschreibung:

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

Anwendung:

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen